

Utilização Implantes Biomose XP & Surgitime Titânio SEAL



Caso clínico cedido por
Clinical case courtesy of

Prof. Dr. Fábio Mizutani
Fabio Mizutani, DDS Ms

Evidências Clínicas
Clinical Evidence

Técnicas Cirúrgicas
Surgical Technique

Segurança & Biocompatível
Safe & Biocompatible

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
b i o m e d i c a l

by: Fábio Shiniti Mizutani, DDS, MS.(São Paulo / SP - Brazil)

Quadro Clínico / Clinical Condition

Paciente do gênero feminino, 54 anos de idade, Caucasiana

Queixa Principal: Dor a percussão vertical, frequência de perda de cimentação da coroa protética.

Aplicação e Tratamento proposto / Application and Proposed treatment

Exodontia e proteção alveolar com Tela de Titânio,

Fixação de Implante após período cicatricial,

Reabilitação protética,

Pós Operatório / Post OP

Follow up

Produtos / Products:

Cod. 16890 - Surgitime Titânio SEAL 34 x 25 mm (0,04 mm)

Implante Biomorse XP


Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
biomedical


1. Aspecto Clínico Inicial



2. Remoção de Coroa protética e descolamento gengival

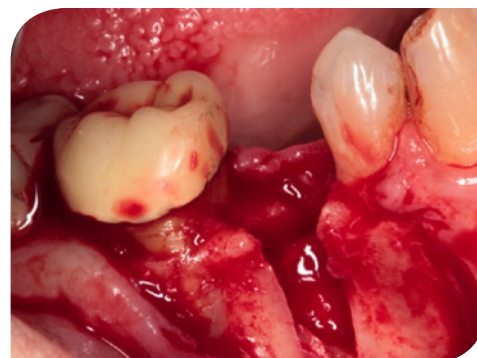

3. Remoção de Fragmento Inicial

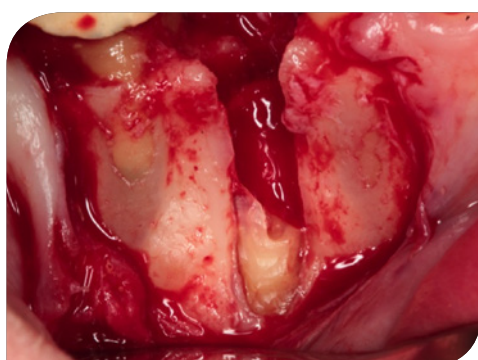

4. Osteotomia para visualização da raiz dental



5. Osteotomia Final




6. Exodontia Finalizada. Aspecto final do alvéolo




7. Confecção de gabarito



8. Recorte da Tela de Titânio de acordo com o gabarito

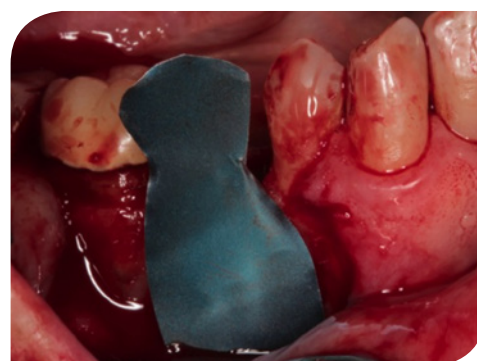

9. Instalação da Surgitime Titânio SEAL

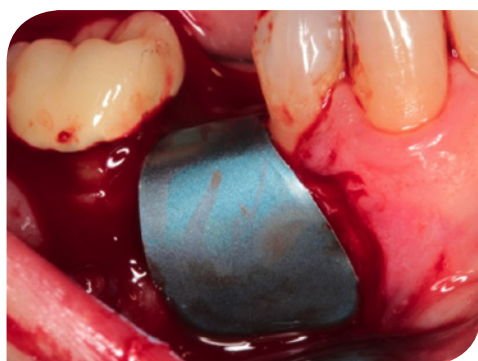

10. Finalização da instalação da Surgitime Titânio SEAL



11. Sutura



12. Notar a Surgitime Titânio SEAL intencionalmente exposta

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
 b i o m e d i c a l


13. PO 10 dias



14. Remoção de Sutura



15. Remoção da Surgitime Titânio SEAL



16. Observação da cicatrização inicial e formação de tecido de granulação



17. Vista Oclusal



18. Observar guarda de memória da Surgitime Titânio SEAL



19. PO 21 dias



20. PO 30 dias




21. PO 30 dias



22. PO 60 dias




23. Tomografia pós operatória 70 dias

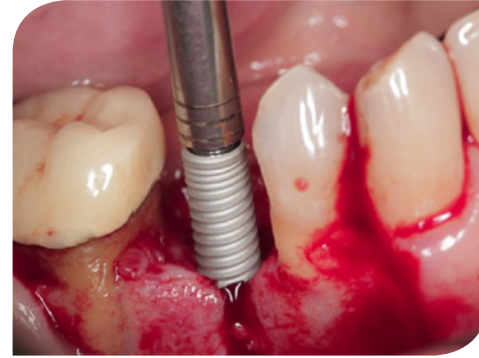

24. Instalação de Implante

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
b i o m e d i c a l

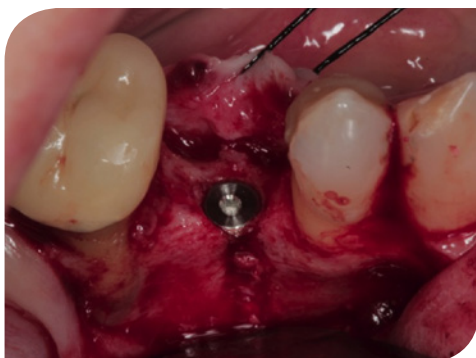

25. Implante Biomorse XP Instalado



26. Sutura



27. Pós Operatório