



Utilização Surgitime Titânio & Bonefill® Denso

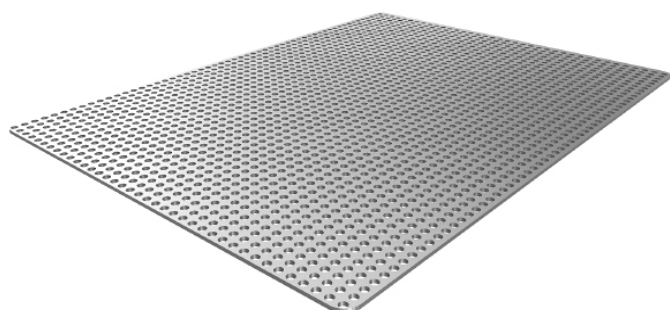

Caso clínico cedido por
Clinical case courtesy of

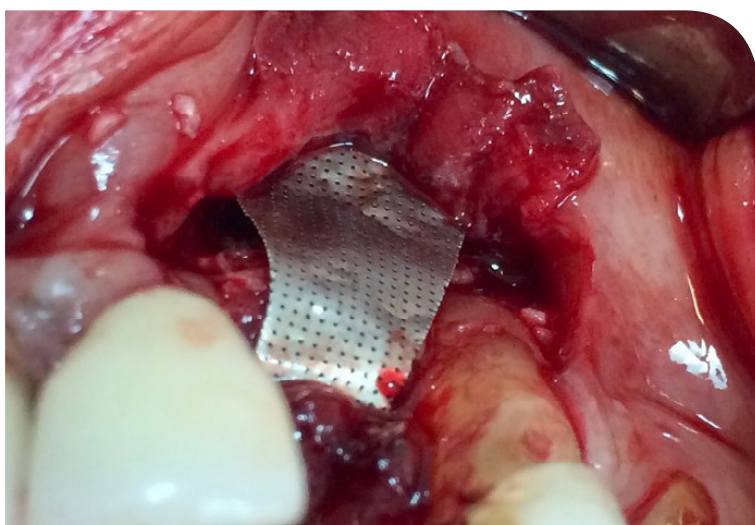

Dr. Everson Watanabe

Evidências Clínicas
Clinical Evidence

Técnicas Cirúrgicas
Surgical Technique

Segurança & Biocompatível
Safe & Biocompatible

Bionnovation
biomedical

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
b i o m e d i c a l

by: Dr Everson Watanabe (Descalvado / SP - Brazil)

Quadro Clínico

Paciente apresentando implante e respectiva prótese com estética insatisfatória e falha na osseointegração.

Aplicação e tratamento proposto

Tratamento por remoção do conjunto implante-coroa e reconstrução por meio de enxerto composto de Bonefill® Denso e osso particulado de tuberosidade maxilar associado a malha de titânio como barreira à infiltração de tecidos moles. Após o período de consolidação do enxerto será realizada nova reabilitação implantossuportada, bem como plástica periodontal para tratamento das recessões gengivais.

Resultado

Leito adequadamente reconstruído no trans-cirúrgico. Após o período de consolidação do enxerto será reavaliado para instalação de novo implante em posição ideal.

Conclusão

Tratamento com implantes requer minucioso planejamento estético-funcional para alcançar resultados satisfatórios. As sequelas oriundas de sequência inadequada de planejamento são de resolução complexa. Na ausência de tecido remanescente, a adequada reconstrução deve ser pleiteada.

Comentários Adicionais

Enxertos para reconstruções de defeitos complexos, podem ser resolvidos com associação de osso particulado e barreiras biológicas, desde que os mesmos possuam características e qualidade para tal, como apresentado no caso.

Clinical Case Report / Relato de Caso Clínico

Bionnovation
biomedical




1. RX inicial Elemento 22




2. Visão da lesão dentária




3. Exposição cirúrgica

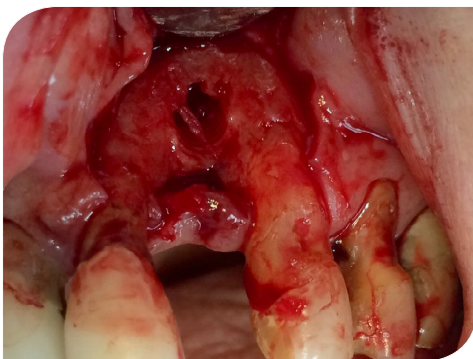

4. Implante removido

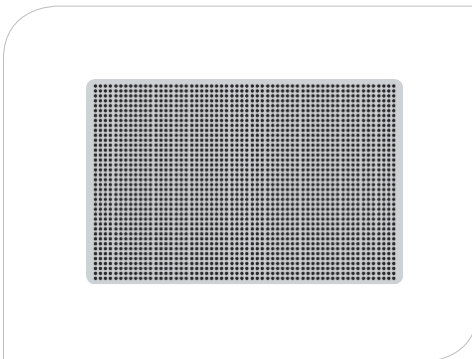


5. Surgitime Titânio (Cód 16565)

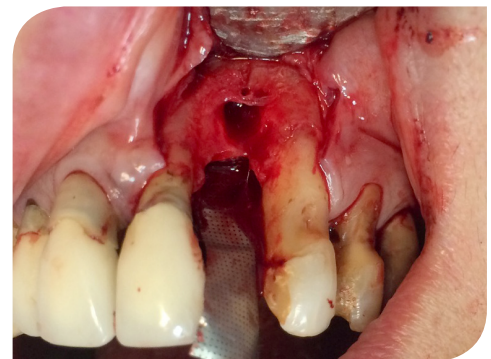


6. Surgitime Titânio adaptada por palatino



7. Bonefill® Denso

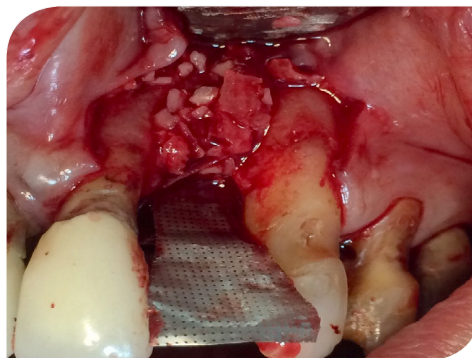

8. Enxerto em posição

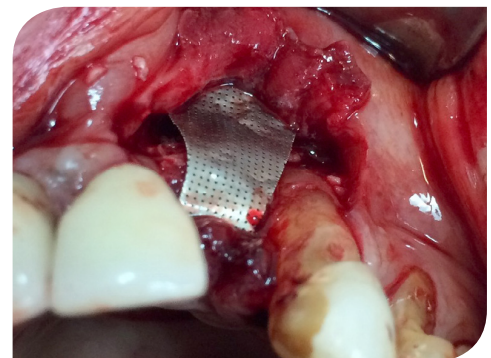

6. Surgitime Titânio adaptada