


Reconstrução de rebordo
com biomateriais - Hidroxiapatita

Alunos do curso de Atualização em
Implantodontia da APCD de Guarulhos

Apresentação do Procedimento

Paciente sexo feminino 44 anos, fumante, branca, apresentando quadro de reabsorção óssea severa da parede vestibular do rebordo alveolar na região de molares superiores do lado esquerdo, após exodontia dos elementos dentais da região aproximadamente 6 anos, impossibilitando o tratamento com implantes osseointegráveis. Tratamento propost: reconstrução da parede com Hidroxiapatita, para reabilitação posterior em 180 dias.

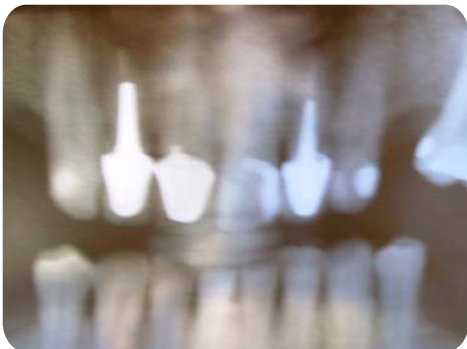

Radiografia inicial. Observar existência de altura óssea




Aspecto clínico inicial




Incisão linear




Incisão de alívio

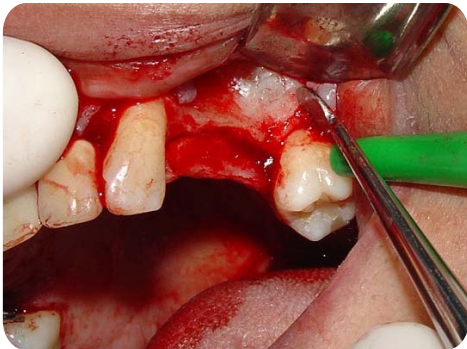

Exposição do rebordo

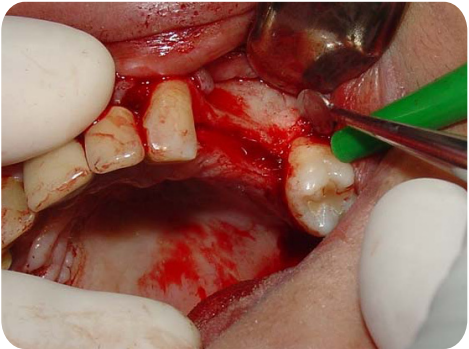

Observar a concavidade da reabsorção

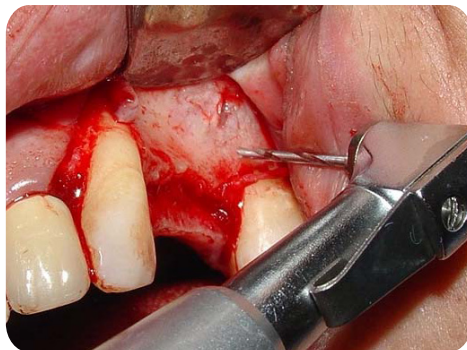

Perfurações da parede vestibular



Imagem clínica das perfurações laterais do rebordo ósseo



Hidroxiapatita 0,50 - 0,60

Reconstrução de rebordo com biomateriais - Hidroxiapatita

Alunos do curso de Atualização em
Implantodontia da APCD de Guarulhos




Hidroxiapatita



Colocação da Hidroxiapatita por camadas



Assentamento da Hidroxiapatita

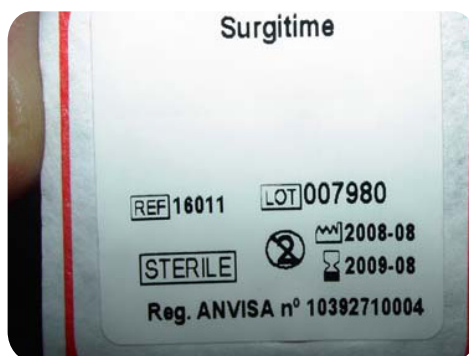


Membrana reabsorvível
Surgitime Bionnovation



Recorte da membrana reabsorvível
Surgitime



Adaptação da membrana reabsorvível
Surgitime

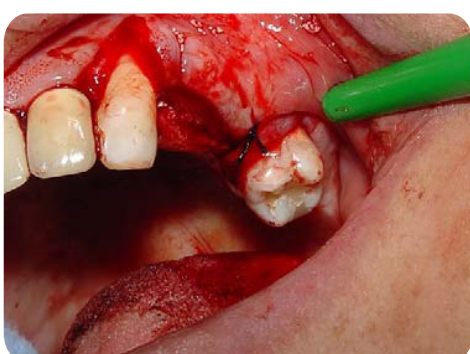

Reposicionamento do retalho cirúrgico



Cirurgia realizada pelos alunos Homero Vilela Azevedo Filho e Rubens Guida Junior

Curso de Atualização em Implantodontia da APCD de Guarulhos
Coordenação Prof. Dr. Carlos A. A. Oliveira.