


Caso Clínico

Reconstrução de rebordo com biomateriais - Osso Bovino

Por Prof. Dr. Carlos A. A. Oliveira

Apresentação do Procedimento


Paciente sexo feminino, 42 anos, branca, com perda precoce dos dentes incisivos e caninos superiores, há aproximadamente 20 anos, apresentando severa reabsorção do rebordo alveolar no sentido vestibulo lingual, na região anterior da maxila, comprometendo o processo de reabilitação com implantes osseointegráveis. Tratamento proposto: enxerto ósseo autógeno, misturado com Bonefill e membrana Surgitime para reconstrução óssea.

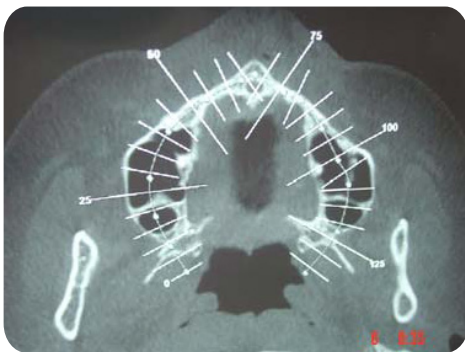


Tomografia inicial evidenciando reabsorção vestibular lingual da maxila




Aspecto clínico do rebordo remanescente

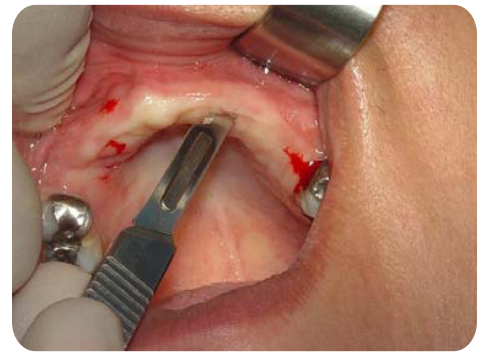


Incisão linear na crista do rebordo alveolar

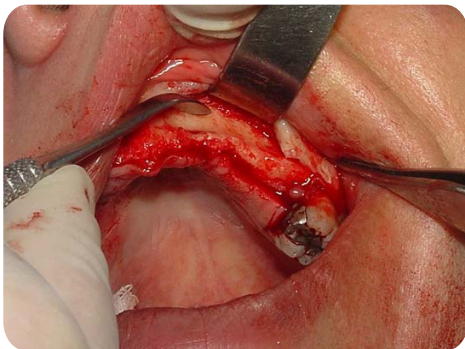

Aspecto côncavo da reabsorção do rebordo

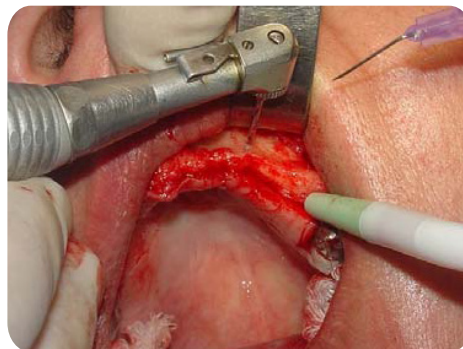

Perfurações da cortical vestibular com fresa helicoidal 1,2 mm

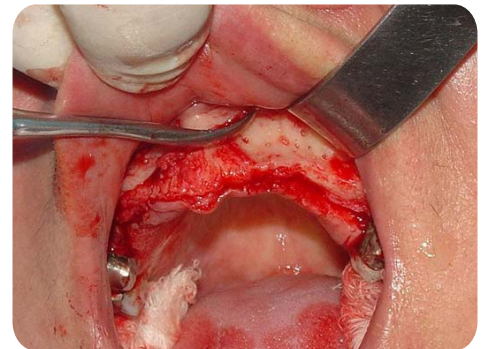


Aspecto clínico das perfurações



Bonefill granulação média



Adaptação do Bonefill

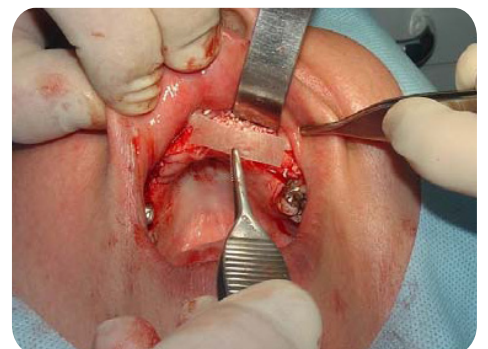


Ajuste da membrana Surgitime

Caso Clínico

Reconstrução de rebordo com biomateriais - Osso Bovino


Por Prof. Dr. Carlos A. A. Oliveira

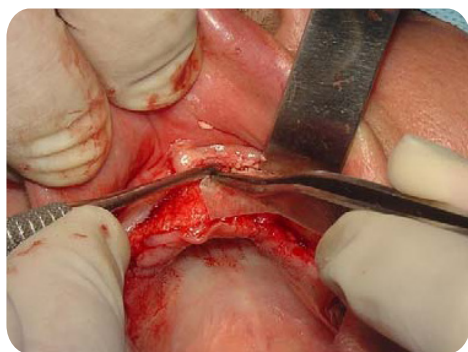


Adaptação da membrana entre o retalho e o enxerto



Sutura com membrana em posição

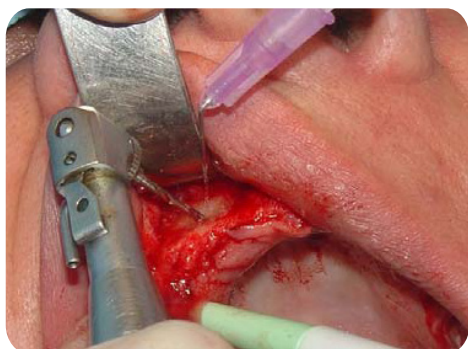


Irrigação constante nas perfurações

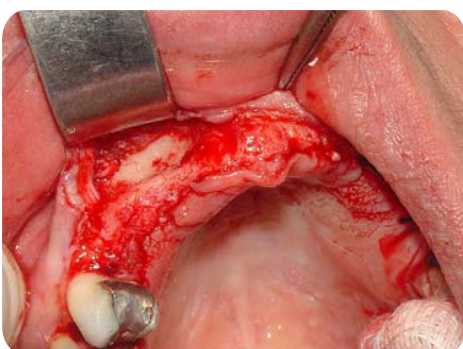

Fenda vestibular lado direito



Condicionamento do enxerto

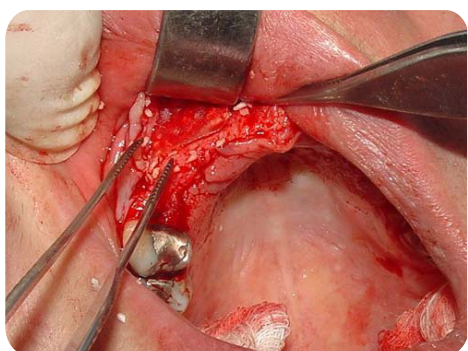

Ajuste da membrana Surgitime



Colocação de próteses provisórias
aliviadas



Professor Dr. Carlos A. A. Oliveira

Cirurgião Buco Maxilo Facial, Mestre em Patologia Bucal, Especialista em Implantodontia, MBA em Gestão Empresarial. Atua como Implantodontista há mais de 20 anos, ministra anualmente dezenas de cursos e palestras. Diretor Clínico da Bionnovation Biomedical.